

## הטייגר וורמר המתגלגל

### מוליך מוקסה לשילוב בטיפולי הדיקור

מאת: זהר ברק אור



הטייגר וורמר המתגלגל הינו כלי חדש יחסית ופותח ביפן. הוא מאפשר לשלב את איכות המוקסה בטיפולים ברפואה סינית ויתרונו הגדול הוא בבטיחות ובנעימות השימוש עימו בטיפולי הגוף והפנים. הוא עשוי ברזל ונחושת ומוליך עם קפיץ המאפשר להחדיר את המוקסה עד לקצה המתגלגל ו"לנעול" את המוקסה באופן שאינה יכולה להשתחרר במהלך הטיפול. בקצה הוורמר, באזור בו בוער מקל המוקסה, מצויה רשת המונעת מאפר המוקסה להתפזר וליפול על פני המטופל. אורך המוקסה – 6 ס"מ ובזכות המוליך, ניתן להשתמש בה עד סופה.



### יתרונות הטייגר וורמר בטיפולי הדיקור הקוסמטי:

מאיץ את סירקולצית הדם בפנים ואל הפנים, מסייע ביצור תאים חדשים וסילוק תאי עור מתים, מסייע בסילוק רעלנים ומגביר יצור קולגן בזכות שיפור תנועת הדם והצ'י. מסייע לטיפול בכתמים, כהות מתחת לעיניים, צניחת עפעפיים ורפיון שרירים כללי, מיצוק ועיבוי העור, מסייע לטיפול בכל בעיות העור ומקדם צ'י בכל נקודות הדיקור.

### הוראות השימוש:

1. יש להדליק את המוקסה ולהחדיר אותה לתוך הטייגר וורמר.
2. יש ללחוץ על קפיץ המוליך ולהחדיר את המוקסה עד קצה הוורמר.
3. המרחק בין האש לבין קצה הוורמר תקבע את החום המכסימלי. ככל שנתקרב לקצה כך יתחמם יותר המכשיר.
4. יש לבדוק את חום המכשיר לפני ובמהלך השימוש. הטייגר וורמר מתחמם מאוד במהלך השימוש, ביחוד בשימוש ע"ג הפנים. ניתן לגלגל את הרולר עד 5 דק' על פני העור עד שיהפוך לאדמדם וחלק.

